


# IMPERIAL Symphony

TX-8800 LX-7700

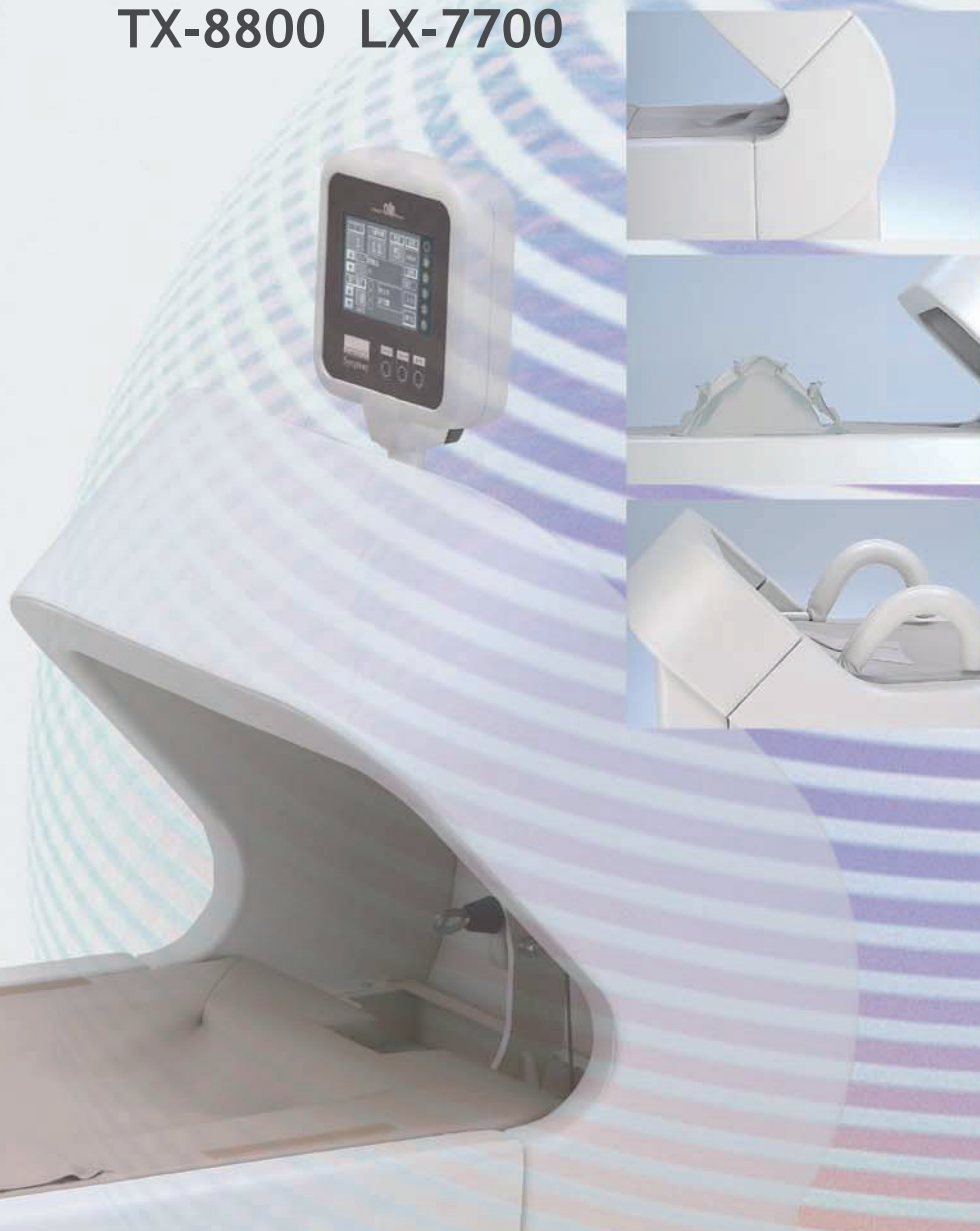

## 手技に限りなく近づく、理学療法の交響詩。

古くから、「手技に優るマッサージは無い。」といわれ、機械での再現は困難とされてきました。シンフォニーは「手技に限りなく近づく。」を開発テーマに、エアーバック・システム（業界初）によるマッサージや牽引機能などを装備。従来のコンセプトを超えた、最高峰のベッド型マッサージ器です。

### シンフォニー

LX-7700

※LX-7700には牽引機能はありません。

IMPERIAL  
Symphony  
TX-8800 LX-7700

Symphony

## シンフォニーがひらくマッサージの交響詩

マッサージ機能の組み合わせによって、治療効果をながく持続させ、高い満足感が期待されます。

### エアバックで理想の腰部マッサージ。

ベッド部に組み込まれたエアバックが作動し、腹部筋を弛緩させて理想的な腰部マッサージを行います。



TX-8800

### はばひろい「マッサージ感」のニーズにこたえます。

患者さんのマッサージ感覚は、個々によって多様です。しっかりマッサージ感の「強モミ」や「ちょっと強モミ」、柔らかタッチの「ソフトモミ」、きめこまやかな配慮の高齢者マッサージなど、はばひろいニーズに満足いただけるプログラムを備えています。

「強モミ」・「ちょっと強モミ」・「ちょっとソフトモミ」・「ソフトモミ」・「シニア専用」・「いたわり」など、各種プログラムの設定ができます。

### 「下肢・腹部垂直振動療法」の提案。

「人体振動理論」の応用により大腿前面・側面、腹部など、広範囲で深部にいたる部位にマッサージ効果を及ぼす「下肢・腹部垂直振動療法」を提案します。

### 「軽いタッチのモミ」(軽揉捏機能)を実現。

揉捏(モミ)は「筋の疲労を効果的にとりさる...」の反面、高齢者や女性の胸背部筋に強い刺激感を与えるおそれがあります。シンフォニーは揉捏本来の効果を損なうことなく「軽いタッチのモミ」、すなわち軽揉捏機能を実現しました。

#### ●手技とシンフォニーマッサージの比較

手技の分類	シンフォニーマッサージ	施術部位
擦法(撫で、擦る)	上半身軽擦法 上半身強擦法(弱) 上半身指圧(弱) 下半身擦法	全身
揉捏法(揉む)	上半身揉捏 頸部固定揉捏 頸肩部移動揉捏 胸背部I 移動間歇揉捏 頸部固定間歇揉捏 頸肩部移動間歇揉捏 腰臀部揉捏 臀部軽揉捏(固定) 上半身軽揉捏 モビリゼーションII	上半身
圧迫法(押す)	上半身指圧(強) モビリゼーションI 遠心性(移動) 求心性(移動) Rミックス 胸背部II	上半身
振せん法(震わす)	振動ミックス シャッフル(移動) シャッフル(固定) シェイク(固定) スイング(固定) スロー(固定)	下半身
叩打法(叩く)	叩打 振動ミックス シェイク(移動) スロー(移動)	下半身
矯正	指圧(強) モビリゼーションI(強) モビリゼーションII(強) 求心性(強) 遠心性(強) Rミックス 揉捏(強) 間歇揉捏(強)	上半身

Symphony

## 最高峰ならではのシンフォニー牽引

ニーズの高い腰椎牽引・頸椎牽引治療に、シンフォニーが冴えます。(足首牽引も可能)



#### ① エアバック・システム(業界初)

ベッド部に内蔵されたエアバック・システムが腰椎牽引時に自動的に作動して、理想的牽引姿勢であるセミファーラー姿勢を保持します。



#### ② ワンタッチ脇装具

ベッド部に装備された脇装具は、患者さんに装具を付ける手間を省いたワンタッチ式の一体型です。(脇部の前後・左右が調節できる機能が付いています。)

#### ③ 分割スライドベッド機能

ベッド部は腰椎牽引時に分割・スライドしてスムーズな牽引を行います。



#### ④ 頸椎牽引



#### ⑤ 足首牽引

### 3種類の牽引機能をひとつのプログラムにセット

ひとつのプログラムに、前もって腰椎・頸椎・足首の異なる3種類の牽引機能をセットすることができます。

## Symphony 治療プログラム例

①	プログラム名	ステップ	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	擦法モニース	高齢者対応	設定	⑤	⑧	⑤	⑤	⑤	⑧	⑧	⑤	⑤	
		移動	腰→首	固定	固定	首→腰	腰→首	固定	首↔肩	首→腰	固定		
		上半身	軽擦法	頸部揉捏	頸間歌揉捏	軽揉捏	軽擦法	頸部揉捏	頸肩部揉捏	軽擦法	足裏		
20%	下半身			スロー	スイング	ミックス		スイング	シャッフル				
②	プログラム名	ステップ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	筋揉捏コース	強刺激対応	設定	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨
		移動	腰→首	首→腰	腰→首	固定	首↔肩	首→腰	固定	腰→首	固定	首→腰	固定
		上半身	全身揉捏	指圧	Rミックス	頸部揉捏	頸肩部揉捏	求心性	モビリティ	全身揉捏	頸部揉捏	指圧	足裏
90%	下半身	ミックス		ミックス			叩打法	ミックス			ミックス	シャッフル	
③	プログラム名	ステップ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ハイストレッチ	強刺激対応	設定	⑦	⑦	⑦	⑨	⑨	⑦	⑦	⑨	⑦	⑦
		移動	腰→首	首→腰	腰→首	固定	首↔肩	首→腰	腰→首	首↔肩	首→腰	腰→首	首→腰
		上半身	遠心性	全身揉捏	指圧	頸部揉捏	頸肩部揉捏	間歌揉捏	頸部揉捏	頸肩部揉捏	求心性	指圧	Rミックス
70%	下半身	ミックス	叩打法				叩打法	ミックス		ミックス		ミックス	
④	プログラム名	ステップ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	リンカセーション	柔らか刺激	設定	⑤	⑨	⑤	⑤	⑧	④	⑤	⑤	⑤	⑤
		移動	腰→首	固定	首→腰	腰→首	首↔肩	首→腰	固定	腰→首	首→腰	固定	
		上半身	指圧	頸部揉捏	全身揉捏	指圧	頸肩部揉捏	Rミックス	モビリティ	間歌揉捏	指圧	足裏	
50%	下半身	スロー		スイング	エアバック		ミックス		スイング		スロー		
⑤	プログラム名	ステップ	1	2	3	4	5	6	7	8			
	腰椎牽引	設定	⑤	⑧	⑤	⑤	⑤	⑤	⑧				
		移動	腰→首	固定	固定	首→腰	固定	腰→首	首→腰				
		上半身	全身揉捏	頸部揉捏	頸間歌揉捏	Rミックス	モビリティ	遠心性	求心性	腰椎牽引			
50%	下半身	スイング			ミックス		スロー	叩打法	エアバック				
	牽引時間								5分				
⑥	プログラム名	ステップ	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	頸椎牽引	設定	⑤	⑤	⑤	⑨	⑧	⑤		⑤	⑤		
		移動	腰→首	首→腰	腰→首	固定	固定	首→腰		腰→首	首→腰		
		上半身	全身揉捏	Rミックス	指圧	頸揉捏	頸間歌揉捏	求心性	頸椎牽引	間歌揉捏	Rミックス		
50%	下半身	ミックス	スイング				ミックス		スイング	スロー			
	牽引時間							5分					
⑦	プログラム名	ステップ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	トリプル牽引	設定	⑤	⑧	⑧	⑤		⑤	⑤	⑤		⑤	
		移動	腰→首	固定	固定	首→腰		腰→首	首↔胸	首→腰		固定	
		上半身	Rミックス	頸部揉捏	頸間歌揉捏	求心性	頸椎牽引	間歌揉捏	胸背部II	Rミックス	腰椎牽引	足裏	足首牽引
50%	下半身	ミックス			ミックス		スイング	スロー	ミックス	エアバック	スイング		
	牽引時間					3分				3分		3分	

### ●操作部液晶パネル



## Symphony 仕様

定格電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	600VA (ヒーターON) 400VA (ヒーターOFF)
電撃保護形式	クラスI機器
電撃保護程度	B形
外形寸法	2400 (W) × 710 (D) × 575 (H) mm 操作部の高さ: 1400 (H) mm (外形寸法はTX-8800/LX-7700とも共通) (踏台: オプション)
本体重量	255kg (TX-8800) / 200kg (LX-7700)
牽引能力 (TX-8800)	腰椎: 50~950N (5~95kg) 頸椎: 50~500N (5~50kg) 足首: 50~500N (5~50kg)
医療機器の分類	管理医療機器 (クラスII) 特定保守管理医療機器
電磁両立性 (EMC)	IEC60601-1-2 : 2001適合
承認番号	22000BZX00957000

インペリアルシンフォニー  
<http://www.ooshima.me>



安全に関するご注意

- ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 定期的に機器の点検を行ってください。

※仕様及び寸法等は変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。



株式会社 神戸メディケア

TEL: 0120-35-8866 <http://www.taisya.net/>

神戸本社 〒652-0831 兵庫県神戸市兵庫区七宮町1丁目4-21 シェンブルク神戸1F TEL: 078-671-5656 FAX: 078-671-5659

<http://www.sokusin.net/>

東日本営業所 〒332-0012 埼玉県川口市本町4-13-1 第一三井ビル2F TEL: 048-229-1588 FAX: 048-225-1755

<http://www.onyokuki.com/>

北九州営業所 〒806-0036 福岡県北九州市八幡西区西曲里町2-1 黒崎テク/プラザI-7階 TEL: 093-647-1717 FAX: 093-647-1718

<http://www.kaigoki.com/>